

還元水は胃腸症状の改善に有効です!

フェリス・アクアは水道水から、健康に役立つ「還元水」を作る医療用機器です。「還元水」とは、水を電気分解して生成される。懸濁剤の水のことで、水の機能性をアップさせています。毎日飲むことで胃腸症状の改善*を促し、胃腸の働きを整えてくれます。また、食べ物本来の持つみずみずしさや、おいしさを引き出してくれます。

胃腸症状の改善*は…
胃もたれや胃の不活動性
がとびやみ。
胃腸の働きを助けお返し
効果があります。



Feliz Agua

連続式電解水生成器 フェリス・アクア

管理売場情報 保証番号 221AKBZX00013A01

本書で取扱いしている保証「電解水生成器」の「電解水生成器」は、
2017年3月20日までの「Feliz」の「電解水生成器」の「電解水生成器」です。

省エネ・安心・使いやすさの機能をプラス



自動消灯（オートOFF）機能を追加。
待機中のわずかな電費もムダにしないよう、使用
終了3分後ランプを自動消灯します。ランプは通
電するが、いづれかボタンを押すと再び点灯します。
*消費電力は約10W程度です。



自動洗浄機能や酸性水使用後の配管内の滞留水を
排水していただくためのリード音を追加。
自動洗浄機能などの動作に違和感のない音を追加して
いただくため、一音程（約300cc）排水されるまでの間、
電子ガイ音が流れ続けます。



健康

美容 料理 に役立つ3種類6段階の水が生成できます。

胃腸によく、お料理もおいしいを引き出す

電解還元水 （弱酸性・弱アルカリ性）

還元水は、電気分解でマイナス電極にできる水で、まる
やかで飲みやすいため、胃腸の調子を整える効果がある
ほか、素材の本来持つおいしさを引き出すので、あらゆる料
理の味を、驚くほどおいしく引き立てます。

4段階

野菜の洗浄・アツク除去に
ゴボウやタマネギなどの、野菜の
表面の汚れを落とす。動物性アツク
を効果的に取り除きます。



3段階

飲用・料理に
コーヒー、紅茶、ジュース、
うまみ調味料の
おいしさを引き出す。



2段階

飲用・飲用に
お湯がつかいやすくなるためお湯を
作り、お風呂のお湯を立ちます。



1段階

飲用・飲用に
毎日少しずつ飲むことで、
胃腸の働きを助けます。お風呂は
このお湯を効果的に使えます。



*お風呂のお湯を効果的に使うには、お風呂の水を交換してください。

汚れやニオイのない

浄水

コートリッジ内で、水道水のカルキや臭
みや色、ニオイを活性炭に除去する
ため、そのままだでもおいしい水としてお
使いいただけます。



薬・ミルクに
不純物を取り除き、ミルクの味や香
味の妨げをなくして清潔です。

弱酸性でお肌にやさしい

電解酸性水 （使用用途：洗濯や洗いにのみ）

酸性水は、電気分解のプラス電極に
できる水で、ものを引き締める働き
があります。洗濯に使用すると、お
肌を整える作用があります。また、
種々なお掃除にもご利用いただけます。



洗濯に
弱酸性だからお肌によ
やくし、洗濯や手洗いに
ご利用いただけます。

お掃除に
弱酸性の力で汚れを落とすことでお掃除が
楽々、お掃除の回数も減らすことができます。

高性能電解槽と浄水システムを完備。ひとクラス上の電解水生成器です。

①カートリッジで不純物を除去

薬、おいしい水に。
まず、水道水が電解槽に入る前に、おこなわれる「浄水システム」。同時に、初期設定で付いているコートリッジで、カルキや臭み、色味などを取り除き、おいしい水をつくりだします。


②浄水を高性能電解槽でイオン分解

結果によってできる性能や効果は異なるため、電気分解槽による電解を調整、詳しくは、お取り扱いの資料をご覧ください。安心した電解槽を使用いただけます。

③還元電圧 -250mV以上を実現

すべての電解槽の中で、最も電解槽の中で高い還元電圧を実現しています。しかも、電解槽の水質をモニタリングして、安心してイオン水を生成することができます。

●電圧性の電圧

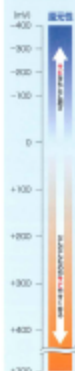

※1段階は弱酸性電解水（弱酸性）

水の電圧	電圧 (mV)
酸性水	+500 ~ +750
還元水	+100 ~ +200
フェリス・アクア の水	> -200 (以上)

*単位：電圧はmV (ミリボルト)。

Feliz Agua

フェリス・アクア

医療機器認証番号221AKBZX00013A01

特長

①15t処理の浄水カートリッジ、交換のお知らせ

1日40ℓご使用で約1年間(15t)ご使用になれます。浄水カートリッジ交換時期は、14tでカートリッジランプの点滅、15tでランプが点灯してお知らせします。

②高性能電解槽

4室5枚の電解槽を採用。電極板にはチタンプラチナコーティング電極を採用。電解効率を高め、安定した電解水が得られます。

③全自動洗浄機能

マイコン制御のオートクリーニング方式。毎使用後時間に応じて洗浄します。電極板のスケール付着による、電解能力の低下を防ぎます。

④メロディー ON/OFFスイッチ

電解酸性水生成中はメロディーが鳴ります。気なる場合は消すことも可能です。

⑤使いやすいコンパクト設計

蛇口から取水する2ウェイ方式で設置場所を選ばず、壁掛けも可能。

仕様

給水仕様	蛇口分岐式 (2Way)
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	約200W
本寸法	幅240×高さ290×奥行115 (mm)
体重	約5kg
操作方法	押しボタン式 (生成水切換・電解強度切換・酸性時メロディー)
最高使用水温	約40℃
使用水道圧範囲	0.1~0.5MPa (1.0~5.0kg/cm ²)
処理水量	4.5~5.0ℓ/分 (吐水量3.0~3.5ℓ/分)
電解能力切替	浄水・電解4段階
電極材質	チタン・白金コーティング (電極板5枚)
電極洗浄	自動洗浄
浄水処理能力	15,000ℓ (原水残留塩素濃度2mg/ℓに対し、0.4mg/ℓに達するまでの水量)
ろ過材料	銀素活性活性炭・亜硫酸カルシウム
交換表示	ランプ点灯
電源保護	ガラス管ヒューズ
過電流検出	電解出力自動停止
過熱保護装置	電源トランス温度センサー内蔵
付属品	分岐水栓 (3段階切換シャワー付き)、アダプメントセット、グリセコロン殺菌カラム、pH測定液、ホースセット (Wホース、シングルホース)

※商品の仕様は予告なしに変更することがあります。

使用上の注意

- 水道水の水質基準に不適合な原水は処理できません。使用しないでください。
- 硬水を軟水に変えることはできません。
- 地域によって塩素除去能力の寿命に多少の差があります。
- 本器は日本国内でご使用ください。

本体価格
235,000円

標準工事費……………15,000円
浄水カートリッジ……………11,000円
[消費1ℓで交換] 標準価格



- 本器は、薬事法第2条第4項の法令で定める医療機器であり、第6項の厚生労働大臣が指定した管理医療機器です。
- 本器は、薬事法第41条第3項の規定により、厚生労働大臣が定める医療機器の基準(平成17年3月29日厚生労働省告示第122号)に適合したものです。
- 本器は、薬事法第23条の2第1項により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年3月25日厚生労働省告示第112号)の一般要求事項、製造要求事項を満たしたものです。



操作パネル

- 1 洗浄表示ランプ**
電解槽の洗浄を点灯表示します。洗浄は通水後に自動的にに行い、終了後は消灯します。
- 2 還元水/酸性水表示ランプ**
電解還元水、電解酸性水のご使用に合わせて点灯します。
- 3 流量表示ランプ**
電解に適した通水量を表示します。
- 4 強弱切り替え表示ランプ**
切り替え設定ボタンで設定したレンジを表示します。
- 5 洗浄表示ランプ**
電解槽の洗浄を点灯表示します。洗浄は通水後に自動的にに行い、終了後は消灯します。
- 6 還元水/酸性水表示ランプ**
電解還元水、電解酸性水のご使用に合わせて点灯します。
- 7 流量表示ランプ**
電解に適した通水量を表示します。
- 8 強弱切り替え表示ランプ**
切り替え設定ボタンで設定したレンジを表示します。
- 9 メロディーランプ**
点灯時、電解酸性水を使用するとメロディーが流れます。
- 10 休止ランプ**
安全装置が働いた時に点灯します。
- 11 切り替えボタン**
ご使用に合わせて、蛇口から出る水を還元水あるいは酸性水に切り替えることができます。
- 12 強弱切り替え設定ボタン**
●電解の強度を1~4の4段階まで選択できます。
●浄水も選択できます。
- 13 メロディーボタン**
電解酸性水使用時に「メロディーを流す」または「流さない」を切り替えるボタンです。
- 14 カートリッジ交換警告ランプ**
浄水器カートリッジの交換準備時期に点滅し、交換時期に点灯します。

安全に関するご注意

- 腎疾患 (腎不全やカルシウム排泄障害) の方は、還元水を使用しないでください。
- pH10以上の水を直接飲まないでください。(飲用にはpH9.5前後をおすすめします。1日あたりの飲用量は、0.5ℓから1ℓを目安にしてください。)
- 次の方は還元水を飲用する前に、医師にご相談してください。
●医師の指導を受けている方 ●持病のある方、または身体の弱っている方 ●妊娠に兆候のある方
- 還元水を飲用するときには、次のことにご注意ください。
●医薬品を還元水で服用しないでください。
●飲用して身体に異常を感じたとき、または飲用し続けても症状に改善が見られない場合には、医師にご相談してください。
●下痢や発疹などの症状が出た場合飲用を中止し、医師にご相談してください。
- 次の方は酸性水を飲用する前に、医師にご相談してください。
●目の弱い方 ●アレルギートン体質の方
- 初めて使用される方は、pHが中性に近い水を少量ずつ飲用し、その後体調に合わせてpH・量を調整してください。
- 安全のため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。